



ATTACCHI PER PROTESI DENTALI





www.artiglio-italia.it



Attacchi per protesi dentali



Abutments compatibili



Anodizzatore titanio

Artiglio

Azienda di Parma fondata nel 1956, è sita nella famosa Food Valley e Motor Valley italiana, in un territorio dove alle esclusive eccellenze nel campo alimentare si affiancano le più prestigiose case automobilistiche e motociclistiche mondiali.

È un patrimonio nazionale fatto di storia, di ricerca, di metodo, di accuratezze progettuali e costruttive ma soprattutto di uomini e donne, del loro impegno e delle loro capacità di ideare e realizzare prodotti che tutto il mondo ci invidia.

Ed è l'aria contagiosa che si respira da queste parti che ci ha reso appartenenti ed allo stesso tempo possessori di questo incommensurabile "capitale" tecnologico ed umano.



Dopo aver sfogliato le pagine di questo catalogo non esitate a contattarci!

Scoprirete che all'altro capo del telefono o della mail ci sarà sempre qualcuno in grado di fornirvi una risposta puntuale, competente, collaborativa e cortese.

Attacchi prefabbricati

Resilienti

Attacchi che **PERMETTONO** un **MOVIMENTO** fra il dente pilastro e l'attacco

Ammortizzatore Art



Sweet



A-ball



Rompiforza TV

Ter libe

Clock

A-clip



A-rider R



Bilanciatore TV



Cerniera Gelb




Rigidi

Attacchi che **NON CONSENTONO** alcun **MOVIMENTO** fra il dente pilastro e l'attacco

Art




Rec

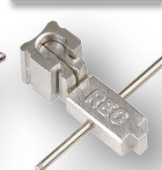

Wing



A-slide

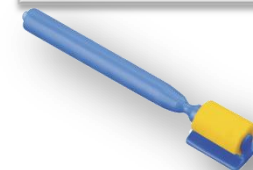

Swift-Art



Ter



A-rider



V-slide GT28



Rec-intra



Skate





ART

È definito "l'attacco per eccellenza" grazie al suo elevato contenuto tecnico che consente di ottenere il miglior compromesso tra funzionalità ed essenzialità. Non esiste, infatti, un sistema più efficiente e semplice dell'attacco **ART**. Casi risolti con attacchi **ART** applicati senza alcun braccio fresato hanno sorprendentemente superato una durata di oltre 15 anni.

Art SUPERMICRO 105



Art MICRO 90

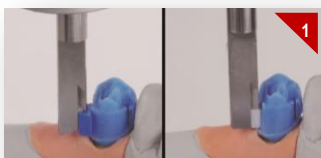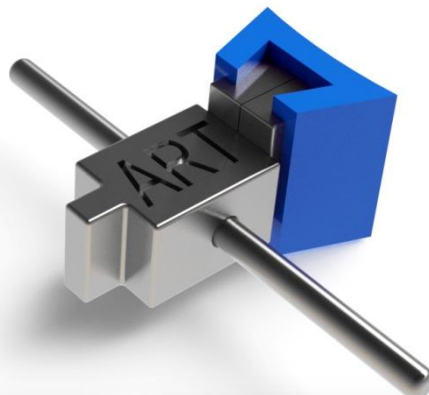


Posizionamento della matrice **ART** in plastica rinforzata e standard



Matrice **ART** fusa come parte integrante della corona



Attacco **ART** correttamente posizionato

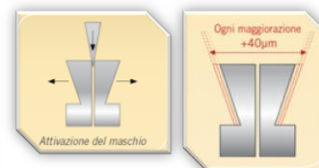

Vantaggi

- Due differenti matrici in plastica calcinabile: standard e rinforzata
- **Maschi** di ricambio disponibili in **4 diverse maggiorazioni** per compensare l'usura della femmina
- Intercambiabilità di matrici e patrici
- Può essere attivato
- Facile sostituzione del maschio senza alcun accessorio
- Precisione industriale dei componenti
- Può essere trasformato in resiliente

Dimensioni (mm)	FEMMINA		ATTACCO COMPLETO			
	Universale		MICRO	SUPERMICRO	CORTO	
	Altezza	Larghezza	Lunghezza		Lunghezza	
			90°	105°	90°	105°
Acciaio inox / Plastica	3,5	2,6	8,8	9,1	8,8	9,1
Acc. inox /Plastica rinforzata	4,0	4,3	9,2	9,5	9,2	9,5

Caratteristiche tecniche

MATRICE

- **Una forma:** con arresto
- **Un materiale:** plastica calcinabile
- **Universale** per tutte le versioni di patrici
- Disponibile anche **rinforzata**

PATRICE

- **Tre componenti:** maschio, guaina e perno
- **Tre differenti versioni:** MICRO, SUPERMICRO e CORTO
- **Due materiali:** acciaio inox
- **Due inclinazioni:** 90° e 105°
- **Unico** maschio metallico disponibile anche **maggiorato**

Consigli per l'utilizzo

Indicazioni

- Protesi parziali inferiori e superiori
- Protesi combinate intercalate ed in estensione
- Protesi monolaterali e bilaterali

Fissaggio

MATRICE: fusa con leghe preziose e non preziose
PATRICE: saldata a protesi parziali rimovibili con leghe preziose e non preziose

REC

L'accoppiamento cilindrico dell'attacco REC fornisce alla connessione protesica l'ottimale "dolcezza" d'inserzione e di disinserzione limitando notevolmente i traumi provocati all'elemento pilastro. La sua forma, in una vasta gamma di dimensioni e di inclinazioni, risente in modo più contenuto delle piccole imprecisioni di montaggio. Diverse versioni di matrici inoltre, consentono la scelta di tutte le tecniche di fissaggio attualmente conosciute.

REC supermicro 90°



REC supermicro 105°




Matrice intracoronale ottenuta col fresaggio



Fresaggio della matrice REC-intra



Inserimento della patrice in una matrice REC-intra fresata

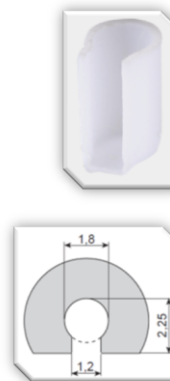

Dimensioni (mm)	FEMMINA		ATTACCO COMPLETO					
	Extrac. – Intrac.		MICRO		SUPERMICRO		CORTO	
	Altezza	Larghezza	Lunghezza		Lunghezza		Lunghezza	
			90°	105°	90°	105°	90°	105°
Acc.inox/Plastica INTRACORONALE	3,5	2,6	9,6	9,7	9,8	9,9	7,8	8,0
Acc.inox/Plastica rinforzata EXTRACORONALE	4,0	4,0	10,1	10,2	10,3	10,4	8,3	8,5

Vantaggi

- Matrice intracoronale disponibile anche in plastica calcinabile
- Femmina extracoronale di grandi dimensioni per garantire un fissaggio migliore
- Facilità di inserzione della protesi
- Può essere attivato
- Facile sostituzione del maschio
- Femmina metallica intracoronale che può essere incollata evitando problemi di saldatura e sovrapposizione
- Matrice realizzabile intracoronalmente con il fresaggio

Caratteristiche tecniche

MATRICE

- **Due versioni:** intracoronale, extracoronale
- **Una forma:** corsa libera, con arresto
- **Un materiale:** plastica calcinabile
- **Universale** per tutte le versioni di patrice

PATRICE

- **Tre componenti:** maschio, guaina e perno
- **Tre differenti versioni:** MICRO, SUPERMICRO e CORTO
- **Due materiali:** lega preziosa e acciaio inox
- **Due inclinazioni:** 90° e 105°


Consigli per l'utilizzo

Indicazioni

- Protesi parziali inferiori e superiori
- Protesi combinate intercalate ed in estensione
- Protesi monolaterali e bilaterali

Fissaggio



MATRICE: fusa con leghe preziose e non preziose. La matrice può inoltre essere ottenuta con il fresaggio all'interno della corona.
PATRICE: saldata a protesi parziali rimovibili con leghe preziose e non preziose

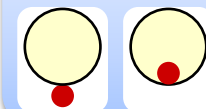

versione Dupli

La versione **Dupli** è disponibile per le serie di attacchi ART, REC e MIL solo nella versione **CORTO**.

Le caratteristiche che distinguono la versione Dupli sono la posizione verticale del perno di ritenzione e la forma della guaina che consentono la realizzazione di protesi altamente estetiche. La versione Dupli dell'attacco REC-intra permette inoltre l'incollaggio sia della matrice che della patrice compensando eventuali potenziali inaccurately di accoppiamento delle controparti.

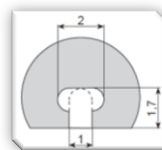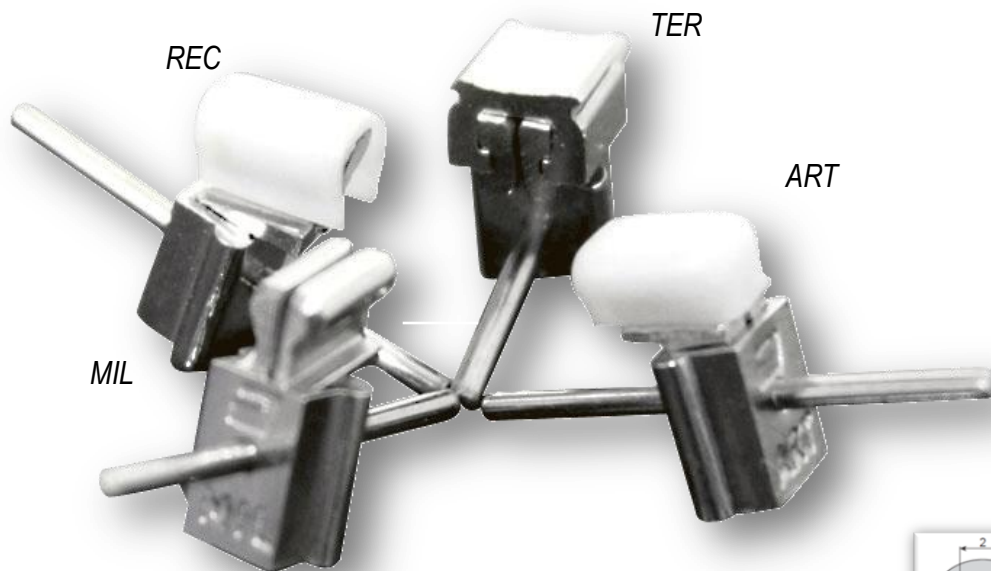

MIL è un attacco speciale ottenuto mediante fresaggio della matrice all'interno della corona

Dimensioni (mm)	FEMMINA		ATTACCO COMPLETO solo versione CORTO			
	universale		Dupli-ART	Dupli-REC	Dupli-TER	
	Altezza	Larghezza	Lunghezza		Lunghezza	
			90°	105°	90°	105°
Acciaio inox / Plastica	3,5	2,6	6,1	6,3	7,0	7,3
Acc. inox /Plastica rinforzata	4,0	6,7	6,9	9,5	7,5	7,8

Vantaggi

- Semplificazione della fase di duplicazione. Il perno verticale evita trascinamenti, rotture e relative imprecisioni del silicone.
- Possibilità di incollaggio della guaina nello scheletrato evitando i problemi della saldatura.
- Facilità di sostituzione del maschio senza alcun intervento sulla parte visibile della protesi
- Può essere attivato

Caratteristiche tecniche

MATRICE

- **Due versioni:** ART e REC
- **Un materiale:** plastica calcinabile

PATRICE

- **Tre componenti:** maschio, guaina e perno
- **Una sola versione:** CORTO per tutte le serie (ART, REC e MIL)
- **Due materiali:** lega preziosa e acciaio inox
- **Due inclinazioni:** 90° e 105°


Consigli per l'utilizzo

Indicazioni

- Protesi parziali inferiori e superiori
- Protesi combinate intercalate ed in estensione
- Protesi monolaterali e bilaterali

Fissaggio

MATRICE: fusa con leghe preziose e non preziose
PATRICE: incollata o saldata a protesi parziali rimovibili con leghe preziose e non preziose

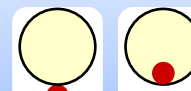

Attacchi vari

Ammortizzatore Art



Consigli per l'utilizzo


Indicazioni

- Protesi parziali inferiori e superiori
- Protesi combinate intercalate ed in estensione
- Protesi monolaterali e bilaterali

Fissaggio

MATRICE: fusa con leghe preziose e non preziose
PATRICE: saldata a protesi parziali rimovibili

Cerniera Gelb

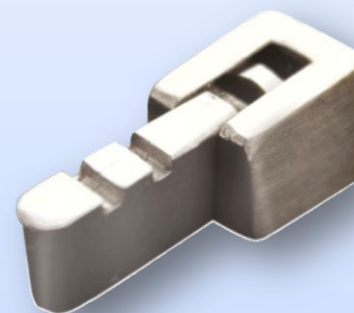

Consigli per l'utilizzo

Indicazioni

- Selle libere monolaterali

Fissaggio

MATRICE: fusa con leghe preziose e non preziose
PATRICE: saldata a protesi parziali rimovibili

Rompiforza TV



ROMPIFORZA TV
ALTO 90°



ROMPIFORZA TV
CORTO 90°



ROMPIFORZA TV
BASSO 90°

Consigli per l'utilizzo

Indicazioni

- Protesi parziali inferiori e superiori
- Protesi combinate intercalate ed in estensione
- Protesi monolaterali e bilaterali

Fissaggio

MATRICE: fusa con leghe preziose e non preziose
PATRICE: saldata a protesi parziali rimovibili

Bilanciatore TV



Consigli per l'utilizzo

Indicazioni

- Bilanciamento di selle libere a grande estensione

Fissaggio

MATRICE: fusa con leghe preziose e non preziose
PATRICE: saldata a protesi parziali rimovibili

Swift-Art

Una nuova generazione di attacchi in plastica calcinabile con patrice da fusione e matrice ad incastro. Facili da adattare durante il posizionamento e semplici da rifinire durante l'accoppiamento, gli attacchi **Swift-Art** rappresentano il prodotto calcinabile di maggior precisione presente sul mercato. Economici ed affidabili, gli attacchi **Swift-Art** sono la risposta migliore per chi desidera un dispositivo universale adatto sia alle più semplici protesi combinate tradizionali sia alle più complesse sovrastrutture su impianti.

Vantaggi

- **Femmina bianca** da utilizzare per la duplicazione, come calibro di riscontro della patrice, o come ritenzione nulla
- Una versione di **patrice inclinata** (125°) che permette un posizionamento più vicino alla cresta
- **Quattro colori di identificazione delle matrici** per offrire un'ampia gamma di ritenzione: bianca, verde, gialla, rossa
- **Altezza del maschio** riducibile fino a 3 mm
- **Elevata ritenzione** grazie ad un'area di frizione di 28 mm²

Dimensioni in mm

Femmina ritenzione media
gialla – 4 pezzi
601505 MN2-B4

Maschio 125°
4 pezzi
602205-B4

Maschio 90°
4 pezzi
602505-B4

Femmina ritenzione forte
rossa – 4 pezzi
601505 MN3-B4

Femmina da duplicazione
bianca – 4 pezzi
601505 MN0-B4

Femmina ritenzione leggera
verde – 4 pezzi
601505 MN1-B4

Starter Kit

Swift-Art • 18 pezzi

- n. 2 Patrici 90°
- n. 2 Patrici 125°
- n. 4 Matrici, BIANCHE – duplicazione e ritenzione nulla
- n. 4 Matrici, VERDI – ritenzione leggera
- n. 2 Matrici, GIALLE – ritenzione media
- n. 2 Matrici, ROSSE – ritenzione forte

CODICE ORDINE: 615001


Accessori

- Insertore matrice (6080)
- Mandrino per parallelometro (6070)

Dimensioni (mm)	Altezza	Larghezza	Lunghezza
Patrice 90°	4,0	2,0	3,0
Patrice 125°	6,0	2,0	3,9
Matrice	4,0	3,7	2,5

Protesi combinata su denti naturali

Barra su impianti

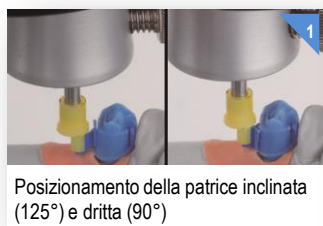

Posizionamento della patrice inclinata (125°) e dritta (90°)



Prova di passivazione con la matrice bianca



Incastro della matrice verde nello scheletrato



Patrici **Swift-Art** applicate ad una barra su impianti



Barra fusa e rettificata



Matrice **Swift-Art** incastrata nello scheletrato

Caratteristiche tecniche

MATRICE

- **Quattro livelli di ritenzione:** nulla (BIANCA), leggera (VERDE), media (GIALLA) e forte (ROSSA)
- **Un materiale:** plastica elastica

PATRICE

- **Due inclinazioni:** 90° e 125°
- **Un materiale:** plastica calcinabile

Consigli per l'utilizzo

Indicazioni

- Protesi parziali inferiori e superiori
- Protesi combinate intercalate ed in estensione
- Protesi monolaterali e bilaterali
- Barre cilindriche (0°) o coniche (2°) su impianti

Fissaggio



MATRICE: incastrata nella protesi parziale removibile
PATRICE: fusa come parte della corona

Skate

Un prodotto innovativo che ha portato ad un'evoluzione della tecnica di fresaggio. **Skate** è un dispositivo semplice ed economico ideato per recuperare la capacità ritentiva delle pareti e/o coulisse parallele. Esso è in grado, grazie ad un'azione di interferenza meccanica, di ripristinare l'area di frizione della parete contrapposta alla sua posizione, riconquistando immediatamente la ritenzione originale del fresaggio. Sono quattro le diverse forme e dimensioni di **Skate**, per consentire l'applicazione nei casi più disparati, così come quattro sono i valori ritentivi disponibili, identificati dal colore del materiale, per offrire alla protesi ritenzioni diverse secondo tempistiche variabili o predefinite.


Vantaggi

- **Doppia durata:** ripristino del 50% dell'area di frizione
- **Patrice bianca** da utilizzare sia per la duplicazione che come ritenzione nulla
- **Quattro colori** di identificazione delle patrici per offrire un'ampia gamma di **ritenzione**: bianca, verde, gialla, rossa
- **Facile sostituzione** della patrice
- Si monta **senza parallelometro**
- **Altezza** della patrice **riducibile** fino a 3 mm

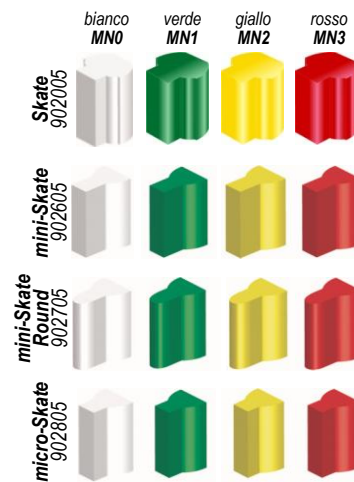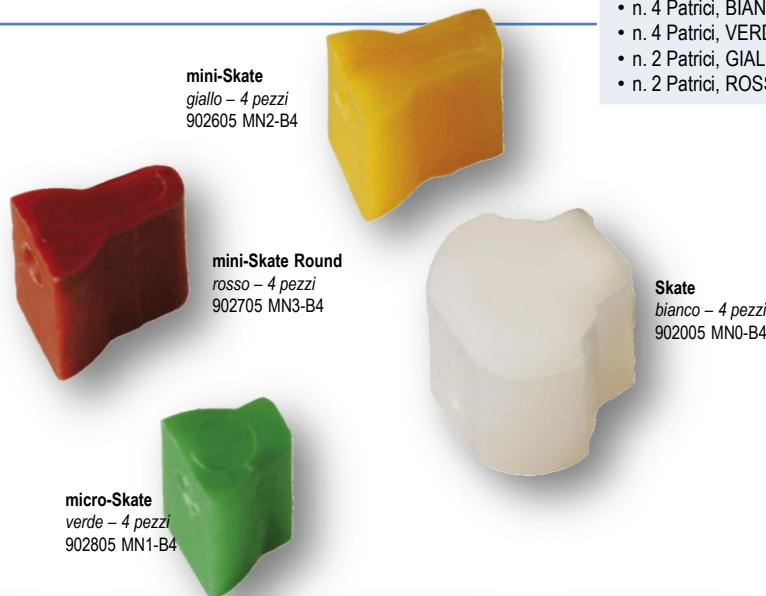


Protesi combinata su denti naturali

Barra su impianti

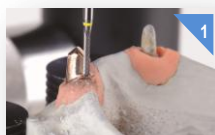

Finitura della corona telescopica in metallo

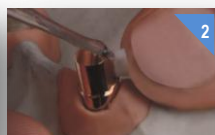

Posizionamento attacco **Skate** sulla cappetta




Modellazione




Rimozione della patrice bianca



Modellazione del connettore in cera

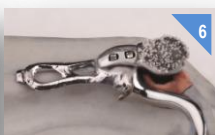

Inserimento dello scheletrato nel connettore fuso

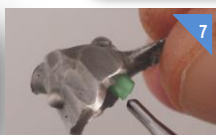

Incastro **Skate** nello scheletrato



Applicazione **Skate** alla barra 0° fusa



Incastro **Skate** nello scheletrato

Caratteristiche tecniche

PATRICE

- **Quattro diversi livelli di ritenzione:** nulla (BIANCA), leggera (VERDE), media (GIALLA) e forte (ROSSA)
- **Un materiale:** plastica

Consigli per l'utilizzo

Indicazioni

- Protesi parziali inferiori e superiori
- Protesi combinate intercalate ed in estensione
- Protesi monolaterali e bilaterali
- Barre cilindriche (0°) su impianti e corone telescopiche

Fissaggio

PATRICE: incastrata nella protesi parziale removibile

Dimensioni (mm)	Altezza	Larghezza	Lunghezza
Skate	4,0	3,7	3,5
mini-Skate	4,0	2,0	3,0
mini-Skate Round	4,0	2,0	3,0
micro-Skate	4,0	2,0	2,0

A-clip ALIS

A-clip sostituisce la parte ritentiva del gancio dello scheletrato e fornisce la possibilità di riattivare la ritenzione cambiando la molla e/o il perno. Inoltre, garantisce un risultato estetico eccezionale unito ad un'estrema facilità d'uso. **A-clip** è un dispositivo a ritenzione elastica, efficace nelle applicazioni con sottosquadri a 0,50 e 0,75 mm che può essere utilizzato anche come bottone ritentivo nelle connessioni fresate.



Barre a 0°

Corone
telescopiche



III

Vantaggi

- **Due diversi perni di 3,50 e 3,75 mm** per compensare sottosquadri di 0,50 e 0,75 mm
- **Facile riattivazione** cambiando la molla interna ed il perno
- **Salvaguardia della forma e dell'aspetto del dente naturale**
- **Eccezionale risultato estetico** nelle protesi semplici ed economiche
- **Ritenzione garantita dalla molla**

Starter kit

A-clip • 6 pezzi

- n. 2 Attacchi completi
- n. 2 Perni 3,75 mm
- n. 1 Chiave svita ghiera
- n. 1 Mandrino per parallelometro

CODICE ORDINE: AF10000

Attacco assemblato



Tappo di protezione

Ricambi



Guaina



Molla



Perno



Ghiera




Analisi del modello



Misurazione dei sottosquadri



Posizionamento attacco **A-clip**

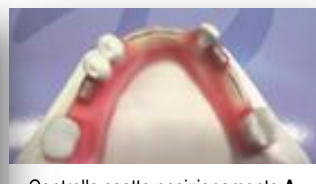

Controllo esatto posizionamento **A-clip** al centro della cresta



Modellazione in cera dello scheletrato



Scheletrato in metallo fuso

Caratteristiche tecniche

- **Quattro elementi:** ghiera, perno, molla e guaina
- **Due materiali:** acciaio inox e plastica

Consigli per l'utilizzo

Indicazioni

- Protesi parziali inferiori e superiori
- Protesi intercalate
- Da usare come elemento ritentivo da montare nella parte secondaria di lavori fresati (corone telescopiche, barre individuali fresate, attacchi individuali fresati). In tal modo è utilizzabile anche per le classi I e II di Kennedy

Fissaggio

- Saldato allo scheletrato
- Bloccato nella resina

Dimensioni (mm)

Dimensioni (mm)	ø	Lunghezza
Attacco completo	3,0	6,0

A-rider

A-rider è un sistema di collegamento primario stabilizzante che consolida i denti pilastro con problemi parodontali. Il suo ingombro ridotto permette l'utilizzo in qualsiasi applicazione sia su protesi tradizionale che su impianti. A-rider funziona come connessione rigida o semirigida, in funzione del diametro prescelto della barra: quello minore offre un'elasticità verticale mentre quello maggiore dona una connessione più rigida. La gamma A-rider inoltre presenta dei cavalieri a resilienza verticale fornibili con ritenzioni per resina mesio-distali MD (versione **A-rider R**).

Cavaliere in lega preziosa

4 pezzi
A707001-B4



Cavaliere in acciaio inox

4 pezzi
A707003-B4

Cavaliere resiliente in acciaio inox

4 pezzi
A707003 R-B4



Cavaliere in plastica bianca

4 pezzi
A601905 MN0-B4




Cavaliere in plastica gialla

4 pezzi
A601905 MN2-B4



Cavaliere resiliente in lega preziosa

4 pezzi
A707001 R-B4

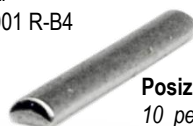


Barra tonda

4 pezzi
- ø 1,8 mm A705005-B4
- ø 1,9 mm A706005-B4



Posizionatore inox

10 pezzi - A70P

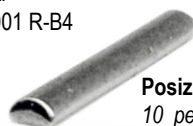

Vantaggi

- **Due versioni di cavalieri metallici** per scegliere la connessione desiderata
- **Due cavalieri in plastica:** bianco (frizione normale) e giallo (frizione forte)
- **Tre versioni di barra in plastica calcinabile:** tonda, sagomata tipo Dolder resiliente oppure ad I, facilmente formabile per seguire l'andamento della cresta

Barra tipo Dolder resiliente

4 pezzi
A708005-B4



Barra a I

4 pezzi
A709005-B4



Fissaggio con cera della barra agli abutments



Barra fusa



Cavaliere in metallo fissato sulla barra



Cavaliere in plastica fissato sulla barra



Barra con due cavalieri in plastica fissati



Cavaliere in plastica incastrato nello scheletrato

Caratteristiche tecniche

CAVALIERI

- **Tre materiali:** lega preziosa, inox e plastica
- **Due livelli di ritenzione:** normale e forte
- **Due versioni:** standard e resiliente.

BARRE

- **Tre versioni:** tonda (ø 1,8 e 1,9 mm), sagomata tipo Dolder resiliente, I-bar
- **Un materiale:** plastica calcinabile

Consigli per l'utilizzo

Indicazioni

- Protesi a supporto dentale e misto dento-mucoso
- Protesi su impianti
- Protesi su selle intercalate
- Protesi combinate e parziali con elevato assorbimento osseo
- Protesi combinate e parziali con pilastri fortemente indeboliti

Fissaggio

CAVALIERE: in lega preziosa o acciaio inox bloccato nella resina; in plastica incastrato nella parte removibile della protesi

BARRA: fusa come parte integrante delle fusioni

Dimensioni (mm)

Altezza

Larghezza

Lunghezza

Cavaliere in oro o inox	3,6	3,4	3,4
Cavaliere in plastica	2,9	3,5	5,0
Cavaliere resiliente in oro o inox	3,4	3,2	3,7

A-ball



Gli attacchi **A-ball** sono attacchi a sfera molto semplici da utilizzare, economici e versatili indicati nei casi più svariati (semplici restauri o overdentures su impianti) e dove gli spazi sono limitati. Disponibili nelle versioni Micro e Supermicro, **A-ball** dispongono di matrici con tre gradi di ritenzione differenziata. L'utilizzo dell'alloggiamento matrice inserito nello scheletrato permette un facile cambio della matrice anche da parte del medico in poltrona. Le patrici in plastica calcinabile, di dimensioni differenziate, consentono un utilizzo per applicazioni in estensione o intraradicolari.



Procedure di lavorazione

- Protesi combinata
- Overdentures su cappe radicolari

Vantaggi

- Non richiede un esatto parallelismo
- Ritenzione elastica
- Bottone radicolare
- Matrici in tre colori che identificano tre diversi livelli di ritenzione: trasparente (leggera), bianca (normale) e gialla (forte)
- Può essere utilizzato con o senza alloggiamento



Analogo transfer

Starter kit - 14 pezzi

- n. 1 Barra dritta
- n. 1 Barra inclinata
- n. 2 Sfere in plastica
- n. 6 Matrici, TRASPARENTI – ritenzione leggera
- n. 2 Matrici, BIANCHE – ritenzione normale
- n. 2 Matrici, GIALLE – ritenzione forte

CODICE ORDINE KIT
micro (ø 2,21 mm): A311001

CODICE ORDINE KIT
supermicro (ø 1,71 mm): A312001

Accessori

- Inseritore matrice
- Mandrino per parallelometro



Posizionamento della parte di barra necessaria



Barra inclinata posizionata seguendo la cresta alveolare



Barra inclinata fusa



Posizionamento delle sfere sul canale radicolare



Sfera prima e dopo la fusione



Alloggiamento inserito sulla matrice

Caratteristiche tecniche

MATRICE

- Tre livelli di ritenzione: leggera (trasparente), normale (bianca) e forte (gialla)
- Un alloggiamento che può essere utilizzato o meno per trattenere la matrice nello scheletrato

PATRICE

- Due dimensioni: micro (ø 2,21 mm) e supermicro (ø 1,71 mm)
- Tre versioni: sfera, barre dritta e barra inclinata
- Un materiale: plastica calcinabile

Consigli per l'utilizzo

Indicazioni

- Protesi superiori e inferiori
- Protesi intercalate e in estensione
- Protesi monolaterali e bilaterali
- Barre su overdentures
- Overdentures su cappe radicolari

Fissaggio

MATRICE: incastrata direttamente nello scheletrato e trattenuta nell'alloggiamento inserito nella parte removibile della protesi
PATRICE: messa in cera e fusa come stampo di fusione

A-slide

Gli attacchi **A-slide** sono estetici, economici, affidabili, facilmente tollerabili dal paziente ed adattabili a tutte le situazioni. Essi combinano l'inserzione semplice con una ritenzione ottimale e rappresentano il progetto più collaudato ed utilizzato da parte dei fabbricanti di attacchi.

Le matrici elastiche hanno bisogno di una manutenzione minima e veloce che può essere effettuata dal tecnico o dal clinico in poltrona in pochi secondi.



Barre a 0°
Barre a 2°




I
III
IV

Vantaggi

- **Ritenzione a frizione**
- **Matrici** in due colori che identificano due diversi livelli di ritenzione
- **Patrice** con **mandrino incorporato**
- **Altezza verticale** patrice riducibile fino a 3 mm
- **Matrici elastiche** **facilmente sostituibili**

Patrice
4 pezzi
A602905-B4

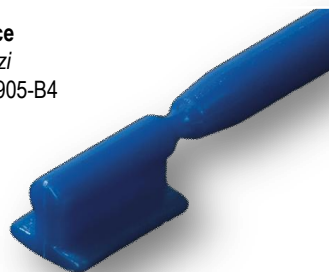

Matrice bianca
4 pezzi
A601905 MN0-B4



Matrice gialla
4 pezzi
A601905 MN2-B4



Dimensioni (mm)	Altezza	Larghezza	Lunghezza
Patrice	6,0	ø 1,8	3,5
Matrice	5,0	3,5	2,9

Starter kit

A-slide • 6 pezzi

- n. 2 Matrici, BIANCHE – ritenzione normale
- n. 2 Matrici, GIALLE – ritenzione forte
- n. 2 Patrici con mandrino incorporato

CODICE ORDINE: 619000

Procedure di lavoro

- **Protesi combinata**
- **Barra su impianti**




Facile posizionamento della patrice grazie al mandrino incorporato



Patrice posizionata e corredata di fresaggio linguale



Patrice fusa come parte della corona

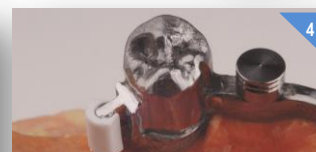

Inserimento della matrice bianca per la prova di passivazione



Posizionamento della patrice su una barra su impianti



Finitura della barra fusa con l'isoparallelometro

Caratteristiche tecniche

MATRICE

- **Due livelli di ritenzione:** normale (bianca) e forte (gialla)

PATRICE

- **Un materiale:** plastica calcinabile
- **Mandrino incorporato** come estensione della patrice che deve essere rimosso dopo il posizionamento
- **Altezza riducibile** fino a 3 mm

Consigli per l'utilizzo

Indicazioni

- Protesi inferiori e superiori
- Protesi intercalate e in estensione
- Protesi monolaterali e bilaterali

Fissaggio

MATRICE: incastrata nella parte removibile della protesi
PATRICE: fusa come parte integrante delle fusioni

V-slide GT28

Gli attacchi **V-slide GT28**, evoluzione dei tradizionali A-slide, sono dotati di patrice con doppia coulisse stabilizzatrice e di un alloggiamento prefabbricato della matrice in metallo. Realizzati con standard qualitativi d'eccellenza, offrono dimensioni ridotte, estetica, economia e assoluta tollerabilità. Le matrici elastiche, da inserire nell'apposito alloggiamento, sono fornibili in tre diversi livelli di ritenzione e consentono una manutenzione semplice e veloce.

Vantaggi

- **Patrice in plastica calcinabile, rettificabile**
- **Contrattacco a doppia coulisse stabilizzatrice**
- **Tre colori di identificazione delle matrici per offrire** un'ampia gamma di ritenzione: **verde** (ritenzione leggera), **gialla** (ritenzione normale) e **rossa** (ritenzione forte)
- **Alloggiamento matrice prefabbricato in metallo**
- **Facile e veloce sostituzione della matrice**



Patrice
4 pezzi
602805-B4

Matrice verde
4 pezzi
601805 MN1-B4

Matrice gialla
4 pezzi
601805 MN2-B4

Matrice rossa
4 pezzi
601805 MN3-B4

Starter kit

V-slide GT28 • 14 pezzi

- n. 2 Patrici calcinabili
- n. 2 Matrici, VERDI – ritenzione leggera
- n. 2 Matrici, GIALLE – ritenzione normale
- n. 2 Matrici, ROSSE – ritenzione forte
- n. 2 Alloggiamenti matrice
- n. 2 Posizionatori alloggiamento matrice

CODICE ORDINE: 618001

Accessori

- Inseritore matrice (6082)
- Mandrino per parallelometro (6070)

Posizionatore alloggiamento matrice
1 pezzo
6074

Alloggiamento matrice
4 pezzi
604805-B4

Caratteristiche tecniche

MATRICE

- **Tre livelli di ritenzione:** leggera (verde), normale (gialla) e forte (rossa)
- Un **alloggiamento in acciaio**, per trattenere la matrice, che può essere incollato, saldato, sovrapposto o bloccato con resina nello scheletrato

PATRICE

- Un **materiale:** plastica calcinabile
- **Doppia coulisse laterale stabilizzante** e guida di ceratura anteriore
- **Rettificabile** anche con isoparallelometro

Consigli per l'utilizzo

Indicazioni

- Protesi superiori e inferiori
- Protesi intercalate e in estensione
- Protesi monolaterali e bilaterali
- Barre parallele (0°) e coniche (2°) su impianti

Fissaggio

MATRICE: incastrata nell'apposito alloggiamento matrice che viene fissato alla parte removibile della protesi mediante incollaggio, saldatura, sovrapposizione o bloccaggio con resina
PATRICE: fusa come parte integrante della fusione

Clock



Clock è un attacco molto efficace che garantisce una dolcissima inserzione e consente il movimento della protesi senza trasferire, nella versione standard, alcun carico al dente pilastro. La protesi è connessa in modo sicuro e, nello stesso tempo, può essere rimossa agevolmente e regolata in base al grado di ritenzione desiderato. La guida di connessione differenziata, matrice cilindrica e patrice sferica, è combinata con una molla ritentiva per assorbire i carichi.

Matrice

plastica calcinabile



Tappo di protezione

Patrice senza protezione



Patrice con protezione superiore




Dimensioni (mm)	Altezza	Larghezza	Lunghezza
Acciaio inox / Plastica calcinabile	5,2	3,9	9,9

Vantaggi


- Elimina i ganci
- Salvaguardia dei denti pilastro che non subiscono i carichi
- Semplice sostituzione dell'interno e/o della patrice con apposito strumento
- Patrice sferica che fornisce una **ritenzione elastica** ed un **movimento resiliente**
- Dolcissima inserzione che facilita e stimola il paziente alla cura dell'igiene della protesi



Matrice inserita nel suo mandrino

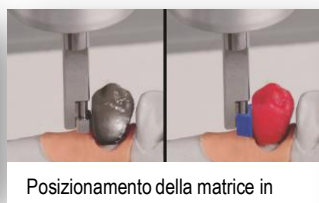

Posizionamento della matrice in plastica e in metallo

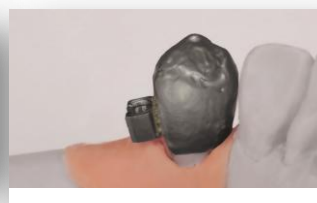

Matrice posizionata



Patrice inserita nella matrice



Posizionamento patrice



Patrice saldata allo scheletro

Caratteristiche tecniche

MATRICE

- **Due materiali:** plastica calcinabile

PATRICE

- **Un materiale:** acciaio inox
- **Due componenti:** interno e guaina
- **Due versioni di guaina:** con o senza protezione superiore

Consigli per l'utilizzo

Indicazioni

- Protesi parziali in estensione
- Selle libere monolaterali


Fissaggio

MATRICE: fusa con leghe preziose o non preziose
PATRICE: saldata a protesi parziali rimovibili o bloccata nella resina


Wing



Wing, grazie alla sua guida differenziata cilindrico-rettangolare, ripartisce in aree distinte la frizione e la tenuta posteriore dell'attacco garantendo un eccellente compromesso funzionale nei casi più frequenti delle protesi combinate. Nonostante la sua connessione rigida, **Wing** permette un'ottima inserzione della protesi combinata unita ad un'elevata stabilità.

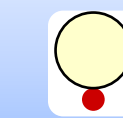

I
IV

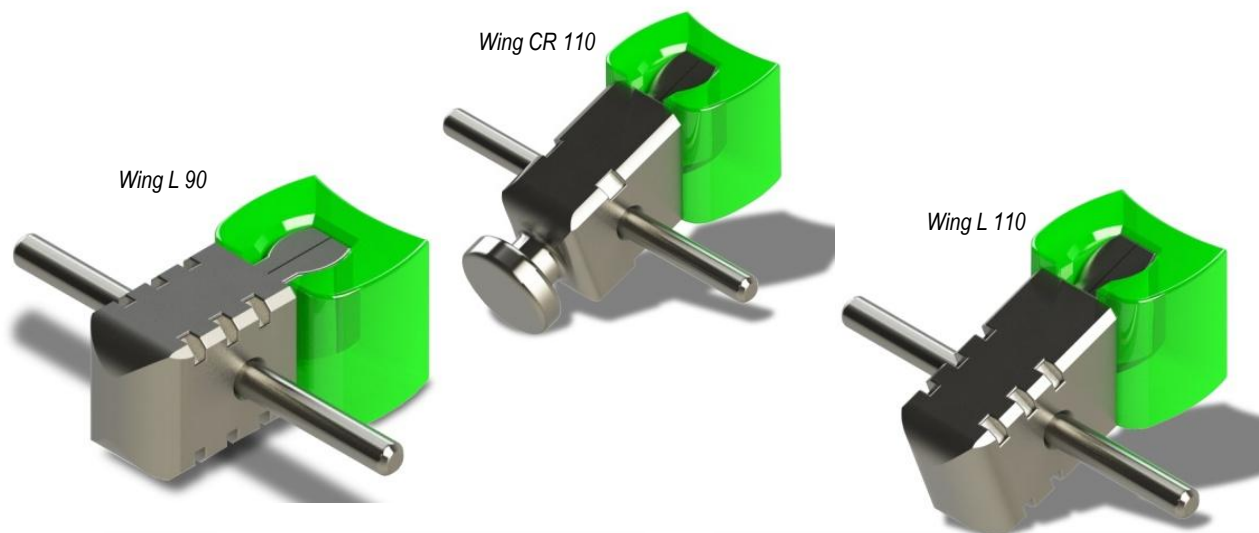

Vantaggi

- Matrici in plastica calcinabile per la **fusione**
- **Piccole dimensioni**
- **Facile inserzione** della protesi unita ad un'elevata stabilità
- **Veloce riattivazione** introducendo lievemente una lamella nella scanalatura del maschio
- **Facile sostituzione** del maschio senza alcun accessorio


Dimensioni (mm)	FEMMINA		ATTACCO COMPLETO		
	universale		C (corto)	L (lungo)	CR
	Altezza	Larghezza	Lunghezza 90°	Lunghezza 90°	Lunghezza 90°
Acciaio inox/Plastica	3,6	3,7	6,9	7,7	8,7



Posizionamento della matrice in plastica



Posizionamento della matrice seguendo la cresta

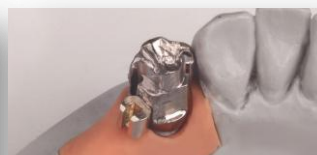

Matrice posizionata



Patrice inserita nella matrice



Inserimento dello scheletrato sulla patrice per la saldatura



Fissaggio patrice con la resina all'interno dello scheletrato

Caratteristiche tecniche

MATRICE

- **Universale** per tutte le versioni di patrici
- **Un materiale:** plastica calcinabile

PATRICE

- **Tre componenti:** maschio, guaina e perno
- **Tre differenti versioni:** C (corto), L (lungo) e CR (corto con guaina speciale per bloccaggio in resina)
- **Un materiale:** acciaio inox
- **Due inclinazioni:** 90° e 110°

Consigli per l'utilizzo

Indicazioni

- Protesi parziali inferiori e superiori
- Protesi combinate intercalate e in estensione
- Protesi monolaterali e bilaterali

Fissaggio


MATRICE: fusa
PATRICE: saldata a protesi parziali rimovibili o bloccata nella resina

Sweet




Sweet è un attacco a guida rettangolare con dimensioni e forme diversificate. La sua peculiarità è una frizione morbida e progressiva per un'azione ritentiva ottimale.

Sweet offre un appoggio combinato, più rigido nei carichi ad estensione ridotta e più resiliente in quelli ad estensione maggiore.

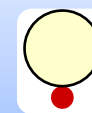

I
II

Sweet L 110

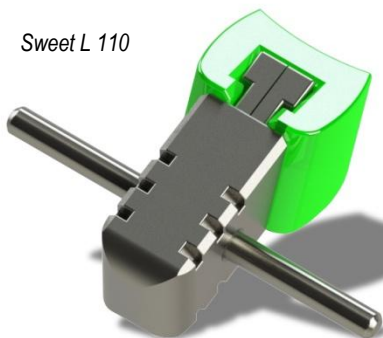

Sweet C 90



Sweet CR 90



Vantaggi

- Connessione ad **azione combinata**: tenuta **rigida** ed appoggio **resiliente**
- **Matrice sovradimensionata** ad elevatissima resistenza per una lunga durata

Dimensioni (mm)	FEMMINA		ATTACCO COMPLETO		
	universale		C (corto)	L (lungo)	CR
	Altezza	Larghezza	Lunghezza 90°	Lunghezza 90°	Lunghezza 90°
Acciaio inox/Plastica	3,6	3,7	6,9	7,7	8,7



Posizionamento della matrice **Sweet** seguendo la cresta




Matrice **Sweet** posizionata



Patrice **Sweet** inserita nella matrice



Posizionamento patrice **Sweet**

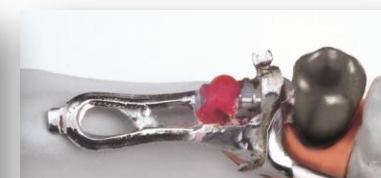

Fissaggio patrice **Sweet** con la resina all'interno dello scheletrato

Caratteristiche tecniche

MATRICE

- **Universale** per tutte le versioni di patrici
- **Un materiale**: plastica calcinabile

PATRICE

- **Tre componenti**: maschio, guaina e perno
- **Tre differenti versioni**: C (corto), L (lungo) e CR (corto con guaina speciale per bloccaggio in resina)
- **Un materiale**: acciaio inox
- **Due inclinazioni**: 90° e 110°

Consigli per l'utilizzo

Indicazioni

- Protesi parziali inferiori e superiori
- Protesi combinate intercalate e in estensione
- Protesi monolaterali e bilaterali


Fissaggio

MATRICE: fusa
PATRICE: saldata a protesi parziali rimovibili o bloccata nella resina


BARRA TONDA



Descrizione	Note	Dimensioni		Confezione
		ø	L	
Barra tonda	Plastica calcinabile	1,8	75	4 pz.
Barra tonda	Plastica calcinabile	1,9	75	4 pz.

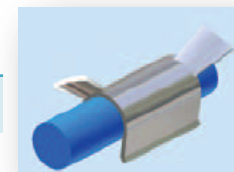BARRA SAGOMATA
tipo DOLDER resiliente

Descrizione	Note	Dimensioni		Confezione
		ø	L	
Barra Dolder	Plastica calcinabile	1,8	50	4 pz.

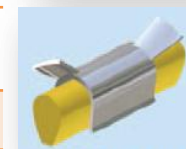BARRA SAGOMATA
tipo I-bar

Descrizione	Note	Dimensioni		Confezione
		ø	L	
Barra a I	Plastica calcinabile	1,8	50	4 pz.



CBS I-Bar

BARRA PIATTA



Descrizione	Note	Dimensioni			Confezione
		ø	H	L	
Barra piatta	Plastica calcinabile	2,0	4,0	100	4 pz.
Barra piatta	Plastica calcinabile	2,0	4,5	100	4 pz.

CILINDRO CAVO
da passivazione

Descrizione	Note	Dimensioni			Confezione
		øe	øi	L	
Cilindro plastica	calcinabile	4,5	3,5	6	5 pz.
Cilindro plastica	calcinabile	4,5	3,5	11	5 pz.
Cilindro plastica	calcinabile	5,0	3,8	6	5 pz.
Cilindro plastica	calcinabile	5,0	3,8	11	5 pz.
Cilindro plastica	calcinabile	5,0	4,0	6	5 pz.
Cilindro plastica	calcinabile	5,0	4,0	11	5 pz.





www.artiglio-italia.it

Artiglio SNC

Strada Naviglia, 3
43122 PARMA (Italy)
Tel. +39 0521 78.25.04
Fax +39 0521 77.46.25
marketing@artiglio-italia.it

